

REVIVE

SKIN PROCESS




THE ULTIMATE DERMATOLOGICAL KIT

doctor-smile.com

COME FUNZIONA

Il laser è una tecnologia ormai affermata in campo medico: grazie alle proprietà biostimolanti della luce permette di eliminare inestetismi cutanei in maniera assolutamente **non invasiva**, senza suture e con una semplice gestione del post-operatorio fino alla completa guarigione. L'azione rigenerativa del laser è utile anche nell'incremento del microcircolo e nell'ossigenazione cutanea, oltre che nella stimolazione e conseguente neosintesi di collagene.

OPERARE CON IL LASER È FACILE E IMMEDIATO

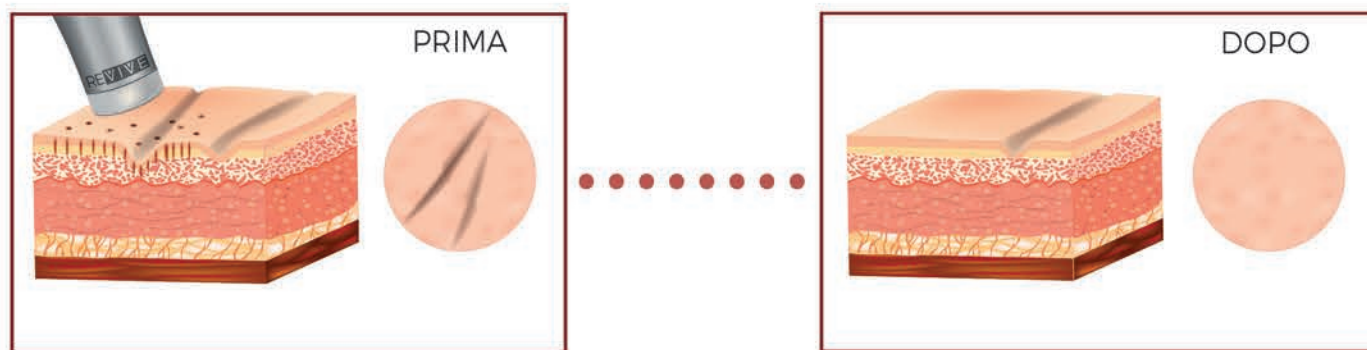

LA QUALITÀ SI RICONOSCE A PELLE

Non invasivo

Semplicità d'uso

Nessuna sutura

Nessuna cicatrice



ALLARGA LA GAMMA DI TRATTAMENTI DELLA TUA CLINICA

Le applicazioni cliniche del pacchetto dedicato alla terapia cutanea del terzo medio inferiore consentono di aggiungere specifici trattamenti all'offerta dello studio dentistico moderno, rispondendo ai sempre maggiori bisogni dei propri pazienti. L'utilizzo del manipolo **REVIVE**, inoltre, permette di effettuare interventi di biorigenerazione cutanea, al fine di ottenere maggiore turgore della pelle, riducendo la presenza di rughe a livello periorale.

CHIRURGIA DERMATOLOGICA DEL TERZO MEDIO INFERIORE mediante tip in fibra

Con questo trattamento è possibile rimuovere efficacemente tutte le lesioni benigne a livello cutaneo del terzo medio inferiore, come fibromi, nevi, verruche, cheratosi. È possibile operare vaporizzando la lesione strato per strato, oppure mediante l'escissione della stessa.


MACCHIE IPERPIGMENTATE DEL PERIORALE mediante tip in fibra

Il laser vaporizza la cute superficiale iperpigmentata e rimuove delicatamente gli strati più scuri dell'epidermide, operando ablazione man mano che la fibra ottica si appoggia sulla zona di trattamento. L'azione terapeutica termina non appena si raggiunge il derma, che appare di colore rosato e segna quindi il buon esito operativo.

BIORIGENERAZIONE CUTANEA DEL TERZO MEDIO INFERIORE

Lo specifico manipolo accessorio **REVIVE** permette di irradiare le aree del terzo medio inferiore interessate da lassità cutanea, dove facilmente si formano rughe o dove i tessuti tendono a cedere col passare del tempo. La biostimolazione laser è coadiuvante alla normale rigenerazione del collagene, soprattutto in ausilio ad altri presidi medici.

CON UN TOCCO SELEZIONA
SUBITO IL PROGRAMMA
DEDICATO AL TRATTAMENTO
DERMATOLOGICO
del terzo medio inferiore

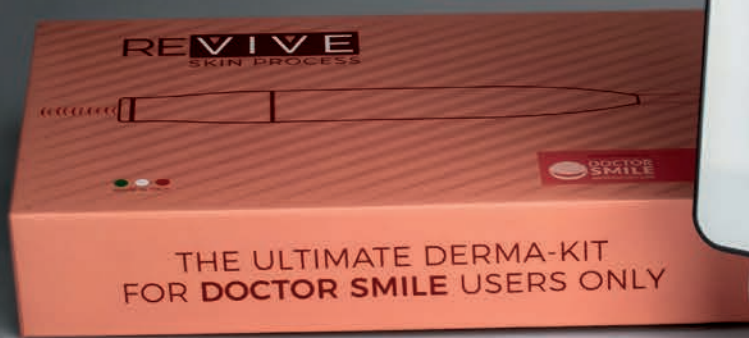

I VANTAGGI DI SCEGLIERE IL DERMA-KIT REVIVE

- ✓ AUMENTO DELLE TERAPIE OFFERTE DALLO STUDIO
- ✓ DIFFERENZIAZIONE PROFESSIONALE
- ✓ FACILITA' DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO
- ✓ ELEVATA SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE



LAMBDA SpA
Via dell'Impresa, 1 | 36040 Brendola (VI) Italy
T +39 0444.349165 | F +39 0444.349954
info@lambdaspa.com | lambdaspa.com

LAFIO030.1* | LAFIO030.2**
è un prodotto esclusivo
Doctor Smile



LAFIO030.1* per modello LA8D001.3
LAFIO030.2** per modelli LA12D001.4 | LA12D001.5

Tutte le apparecchiature laser LAMBDA S.p.A.
Sono certificate CE in rispetto delle direttive EEC
Per attrezzature medicali: ECC Direttiva 93/42



Images attribution "Shutterstock"

AMDP0300



INFO
· doctor-smile.com · info@doctor-smile.com